



LUMENIS ■ SOLTA MEDICAL ■ MIRAVEX

FRAXEL | FINEPEEL | LIPOSONIX | THERMAGE | VASER | CLEAR+BRILLIANT | M22
SYSTEM NANOGREEN PROFI | LIGHTSHEER DUET | ACUPULSE | ULTRAPULSE | ANTERA 3D

НОВЫЙ THERMAGE® CPT

Золотой стандарт безоперационного подтягивания и уплотнения кожи

Thermage® – первый и единственный радиочастотный аппарат, который подтягивает и уплотняет кожу всего за одну процедуру. Работа Thermage® основана на избирательном нагреве соединительно-тканых волокон дермы и подкожно-жировой клетчатки путем воздействия на них радиочастотной (RF) энергией. Непревзойденная особенность Thermage® – это глубокий, объемный и равномерный нагрев ткани, который позволяет добиваться трехмерного уплотнения и подтяжки кожи.

Сегодня компания Solta Medical Inc. (США), лидер радиочастотных технологий в косметологии, представляет третье поколение аппарата – Thermage® CPT.



Инновационный аппарат Thermage® CPT – это технология комфортного импульса (**Comfort Pulse Technology**), которая позволяет проводить процедуру Thermage® с большим комфортом для пациента и при этом получать лучшие результаты.

В основе технологии – новый алгоритм доставки энергии в кожу и использование специальной вибрационной рукоятки.


Импульс, разбитый на 5 подимпульсов, в интервале между которыми подается охлаждение, а также вибрация рукоятки уменьшают восприятие нервной системой термических болевых ощущений.

Пациенты отмечают не только более высокий уровень комфорта во время процедуры на аппарате Thermage® CPT по сравнению с предыдущим поколением аппаратов, но и более выраженные клинические результаты в виде подтягивания и уплотнения кожи.

Температурные сенсоры позволяют прибору оценить степень нагрева поверхности кожи и рассчитать алгоритм ее охлаждения. Во время радиочастотного импульса, нагревающего коллаген внутри дермы и септы подкожно-жировой клетчатки, происходит охлаждение с поверхности в глубину кожи.

Аппараты Thermage® открыли целое направление радиочастотных (RF) методов в эстетической медицине. Новый Thermage® CPT стал еще более безопасным, а процедуры, проводимые на нем – эффективными и комфортными.

Один нагревающий радиочастотный импульс разделен на серию из 5 коротких подимпульсов. В промежутке между ними проводится дополнительное охлаждение.

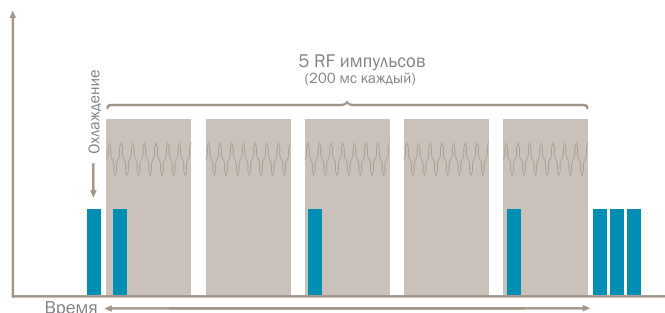

100% пациентов отмечают, что процедура Thermage® CPT значительно комфортнее, чем процедура на аппарате предыдущей версии

МГНОВЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Глубокий объемный нагрев

В отличие от биполярных RF-аппаратов, Thermage® CPT распределяет радиочастотную энергию под всей площадью рабочего наконечника, равномерно разогревая коллаген дермы и соединительно-тканые септы подкожно-жировой клетчатки. Еще одна особенность Thermage® CPT, отличающая его от лазерных и световых технологий, — это возможность безопасно доставить на значительную глубину большое количество энергии без ее потери в верхних слоях кожи.


Объемный глубокий нагрев приводит к мгновенному результату — уплотнению и укорачиванию молекул коллагена. Многие пациенты наблюдают эффект подтяжки сразу после процедуры.

Подтяжка и восстановление контуров лица обусловлены тем, что кожа не только уплотняется на уровне дермы, но и подтягивается за счет сокращения соединительно-тканых перемычек, прикрепляющих ее к мышцам и SMAS (**S**uperficial **M**uscular **A**poneurotic **S**ystem).

Самая важная особенность радиочастотного воздействия Thermage® CPT — это постепенно развивающийся процесс и накапливающийся со временем эффект замены старого и поврежденного коллагена на новый. Видимый результат от процедуры постепенно нарастает и достигает максимума на 6-ой месяц.

Термографическое исследование степени и равномерности нагрева кожи различными RF-аппаратами


Термографические исследования демонстрируют более равномерное распределение тепла в коже и гиподерме при использовании Thermage® CPT по сравнению с другими RF-аппаратами и нагрев большего объема ткани до заданной температуры.

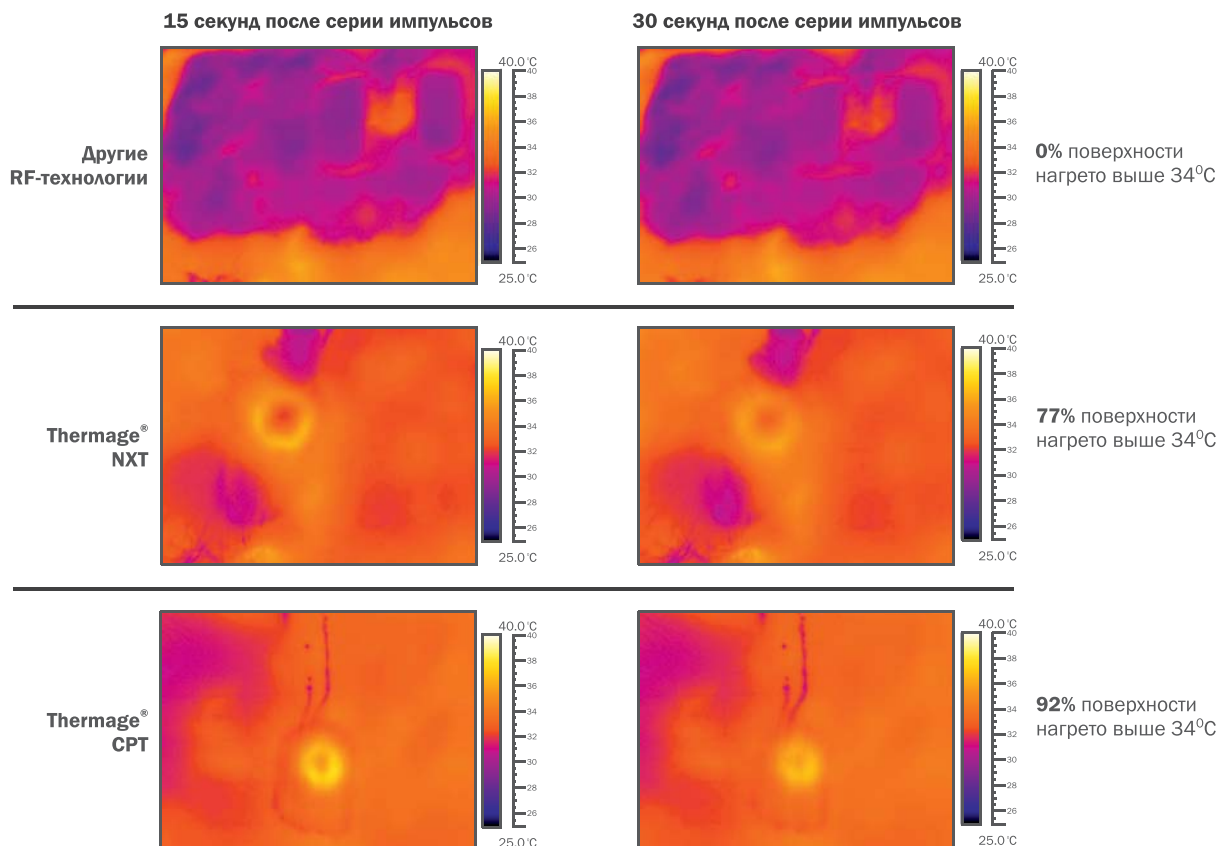

Thermage® CPT обеспечивает максимальный результат за одну процедуру при высокой степени безопасности

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ


Реальные пациенты. Реальные результаты

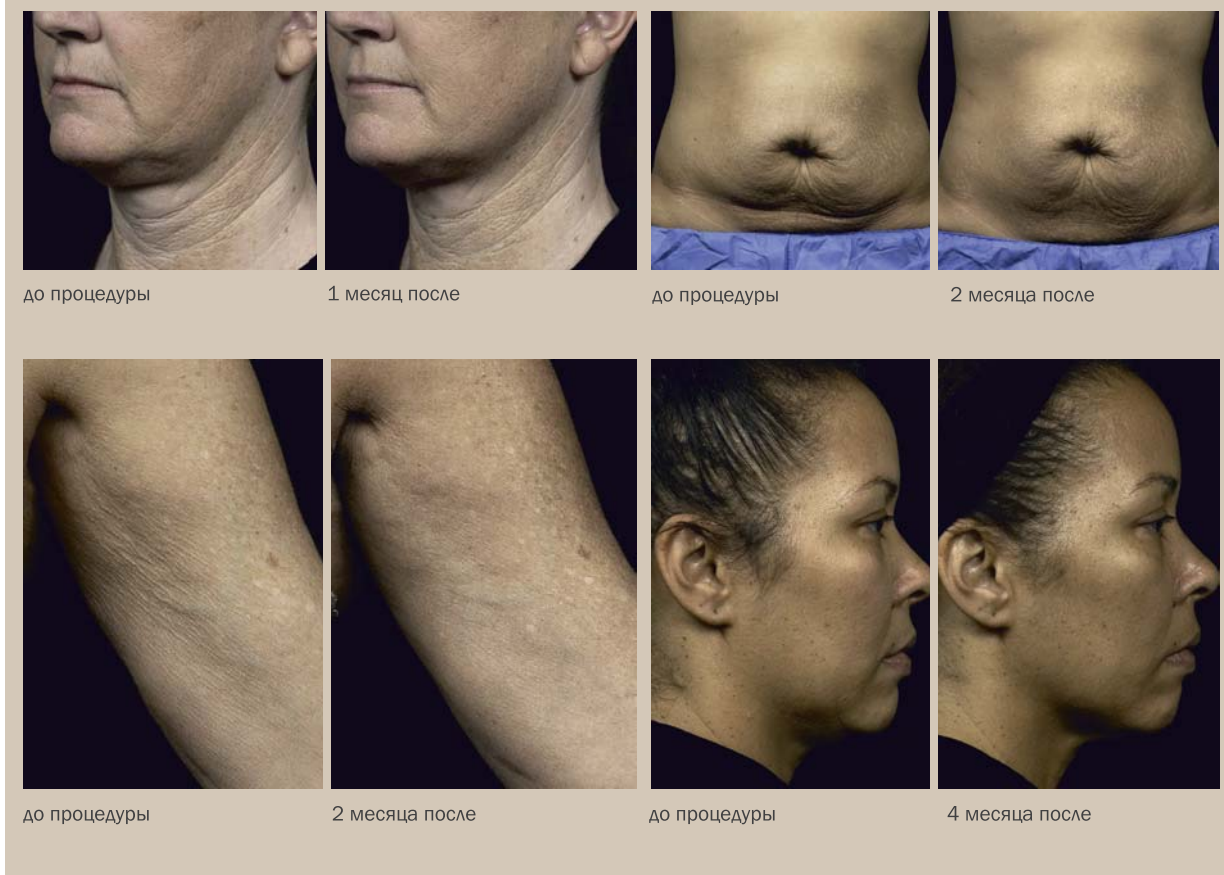

Новая вибрационная рукоятка и рукоятка для работы по телу



Глубина нагрева в зависимости от используемого наконечника

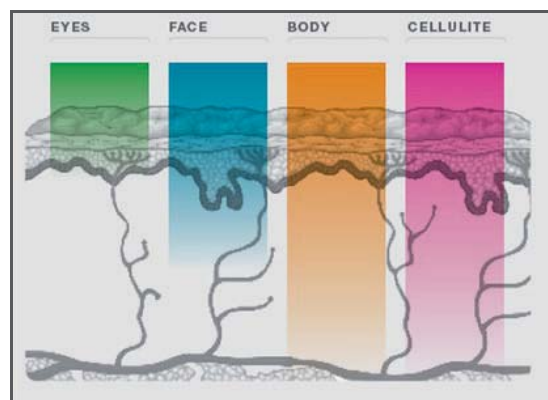

Наконечники Thermage® CPT различаются по глубине и площади воздействия. Дополнительная рукоятка для работы по телу позволяет использовать наконечники площадью 16 см², что ускоряет процедуру в четыре раза.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «Премиум Эстетикс» 123154, Москва, проспект Маршала Жукова, д.51
тел.: +7 (495) 988-21-87, www.premium-a.ru